

Описание

Тест-полоски Акку-Чек Инстант вместе с глюкометром Акку-Чек Инстант предназначены для количественного определения глюкозы в свежей капиллярной цельной крови, полученной из пальца, ладони, предплечья и плеча, как вспомогательное средство для мониторинга эффективности контроля уровня глюкозы.

Тест-полоски Акку-Чек Инстант вместе с глюкометром Акку-Чек Инстант предназначены для диагностики *in vitro* для самоконтроля пациентами с сахарным диабетом.

Тест-полоски Акку-Чек Инстант вместе с глюкометром Акку-Чек Инстант предназначены для диагностики *in vitro* врачами в клинических условиях.

Использовать венозную, артериальную и неонатальную кровь могут только врачи.

Эта система не предназначена для диагностики сахарного диабета или анализа образцов неонатальной пуповинной крови.

Подходит для самоконтроля.

Система содержит:

глюкометр Акку-Чек Инстант с батарейками, тест-полоски Акку-Чек Инстант* и контрольные растворы Акку-Чек Инстант.**

*Набор может содержать некоторые компоненты. Они покупаются отдельно.

**Контрольные растворы не входят в состав набора и приобретаются отдельно.

Предостережение

Результаты определения уровня глюкозы в крови могут отражаться в ммоль/л или мг/дл. Этикетка на оборотной стороне глюкометра показывает единицы определения. Если глюкометр показывает неправильные единицы, обратитесь к Уполномоченному представителю производителя в Украине. Если Вы не знаете, какие единицы определения Вам подходят, обратитесь к врачу. Использование неправильных единиц определения может привести к неправильной интерпретации фактического уровня глюкозы в крови и стать причиной несоответствующей терапии.

- Если глюкометр или глюкометр с вставленной полосой падал, глюкометр и/или тест-полоска могут быть повреждены. Утилизируйте тест-полоску и выполните контрольное определение с контрольным раствором и новой, неиспользованной тест-полоской, чтобы убедиться, что глюкометр и тест-полоски работают правильно. Затем повторите определение глюкозы в крови с новой тест-полоской.
- Не храните тест-полоски в местах со значительным нагревом или влажностью (ванная или кухня)! Нагрев и влажность могут повредить тест-полоски. Используйте тест-полоску сразу после извлечения из контейнера с тест-полосками.
- Используйте только тест-полоски Акку-Чек Инстант.
- Не наносите кровь или контрольный раствор на тест-полоску до вставки ее в глюкометр.
- Плотно закройте контейнер с тест-полосками сразу после извлечения тест-полоски, чтобы защитить тест-полоски от влажности.
- Храните неиспользованные тест-полоски в оригинальном контейнере с тест-полосками с закрытым колпачком

Технические характеристики

Глюкометр автоматически сохраняет в памяти не менее 720 результатов определения уровня глюкозы в крови с течением времени и

датой определения.

Когда в памяти будет 720 результатов определения уровня глюкозы в крови, добавление нового результата определения уровня глюкозы в крови приведет к удалению древнейшего результата определения.

Если в течение 90-дневного периода выполнено более 720 определений глюкозы в крови, то последние 720 результатов определения включаются в расчет среднего значения за 90 дней.

Глюкометр автоматически сохраняет в памяти не менее 30 контрольных результатов, однако в глюкометре можно просматривать только последний контрольный результат. Чтобы просмотреть контрольные результаты, необходимо передать их в совместимое программное приложение.

Когда в памяти будет 30 контрольных результатов, добавление нового контрольного результата приведет к удалению древнейшего контрольного результата.

Контрольные результаты не доступны для просмотра памяти и не включаются в расчет средних значений за 7, 14, 30 и 90 дней.

Глюкометр имеет функцию автоматической синхронизации времени и даты при соединении с мобильным устройством, которое автоматически обновляет время и дату глюкометра. Даже если Вы используете глюкометр в нескольких часовых поясах, результаты сохраняются от новейшего до самого древнего, а не по времени и дате.

Общая характеристика

Гарантия

Применяются нормы закона о правах в сфере продаж продукции потребителям в стране, где совершена покупка.

Гарантийные условия

На глюкометр Акку-Чек Инстант распространяется **БЕССРОЧНАЯ ГАРАНТИЯ И БЕСПЛАТНАЯ СЕРВИСНАЯ ПОДДЕРЖКА.**

Гарантия не распространяется на случаи неправильного и ненадлежащего использования, на механические повреждения, на замену разряженных батареек, нарушение условий и правил эксплуатации, изложенных в данном руководстве пользователя. В случае возникновения подозрения в качестве, оригинальности или официальном происхождении продукции Акку-Чек, и для получения более подробной информации по условиям гарантийного обслуживания, сервисной поддержки, просим обращаться к Уполномоченному представителю производителя в Украине.

Не пытайтесь починить, модифицировать глюкометр самостоятельно. Наш персонал поможет Вам решить любую проблему.

Техническое обслуживание

Для поддержания работоспособности и исправности глюкометра проведение специального и/или регулярного технического обслуживания в сервисном центре или других уполномоченных организациях не требуется.

Производитель

Уполномоченный представитель в Украине

ООО «Рош Украина»

Украина 03150, г. Киев, ул. Большая Васильковская 139, 5 этаж.

Официальный импортер

ООО "Диалог Диагностикс", Украина, 04205, г. Киев, проспект Оболонский 32.

Roche Diabetes Care GmbH Sandhofer Strasse 116 68305 Mannheim, Germany

Рош Диабетес «Кеа ГмбХ», Зандгофер Штрассе 116 68305, Мангайм,
Германия.

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK INSTANT и АККУ-ЧЕК являются товарными
знаками компании Roche (Рош).