

Описание

Универсальные наборы пластырей с подушечкой на полимерной основе широкого спектра использования. Форма выпуска стрип.

Показания

Предназначен для фиксации поврежденных пальцев, при оказании первой помощи в случае мелких ран, царапин, порезов.

Способ применения

Перед использованием вынуть пластырь из бумажного пакета и снять защитную пленку, после чего подушечкой приложить к ране, а края пластыря прижать к коже. Пластырь может оставаться на коже в течение суток.

Противопоказания

Гиперчувствительность к основе пластыря, клеящему веществу.

Побочные эффекты

Раздражение кожи в месте приклеивания.

Предостережение

Пластырь нельзя использовать на открытых послеоперационных ранах. В случае появления сильного раздражения пластырь необходимо снять.

Условия хранения

Хранить при температуре от 5°C до 35°C.

Производитель

ООО "КАЛИНА МЕДИЦИНСКАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ", 04128,
г. Киев, ул, 16/19, Украина