

## **Опис**

Аспіратор призначений для видалення слизу з носа немовлят і малюків. Спеціальна форма пластикового наконечника запобігає надто глибокому проникненню груші в ніс малюка.

- Продукт не містить Бісфенол А
- Можна використовувати від народження
- Спеціальна форма пластикового наконечника запобігає надто глибокому проникненню груші в ніс малюка.
- Аспіратор доступний в кількох варіантах.
- Виріб призначений для дітей віком від 0 міс.
- Не можна кип'ятити, дезінфікувати або використовувати в посудомийній машині.
- Виріб не містить ВРА. Аспіратором має користуватись лише дорослий.

## **Рекомендації щодо застосування**

Утримуйте аспіратор для носа в чистоті. Перед першим використанням продезінфікуйте його в гарячій воді. Після кожного використання мийте м'яким миючим засобом і ретельно полощіть. Залити окропом. Не стерилізуйте і не дезінфікуйте. Перед використанням стисніть аспіратор, щоб звільнити його від повітря. Очищаючи одну ніздрю, обов'язково перекривайте іншу.

Увага! Товар не є іграшкою. Зберігайте аспіратор в недоступному для дітей місці. Виріб призначений для використання тільки дорослими.