

Описание

Быстрый тест для диагностики вируса гепатита С Express Test, это тест-кассета для качественного обнаружения наличия антител гепатита С (HCV) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы.

Вирус гепатита С – это небольшой одноцепочечный РНК-вирус с положительной оболочкой. Антитела к HCV выявляются у более чем 80% пациентов.

Тест использует комбинацию рекомбинантного антигена для выборочного выявления повышенных уровней антител к вирусу гепатита С. Когда достаточный объем исследуемого образца подается в лунку для образцов кассеты, образец капиллярно во время тестирования по образцу крови, реагирует поверхностный антиген гепатита С.

Тест обладает высокой чувствительностью 98,1%, что позволяет определить наличие вируса с точностью результата – 98,9%.

Комплектация

Комплектация состоит из:

1. Саше-пакет, содержащий: тест-кассета – 1 шт, пипетка – 1 шт, осушитель (десикант) – 1 шт
2. Буфер – 1 шт
3. Перчатки медицинские нестерильные смотровые - 1 пара
4. Стерильный одноразовый ланцет 1 шт.
5. Инструкция по применению – 1 шт
6. Салфетки спиртовые – 2 шт.

Способ применения

1. Извлеките тест-кассету из герметичной упаковки и используйте ее как можно скорее.
2. Добавьте в лунку образцов (S) 2 капли цельной крови из пальца или вены, затем 1 каплю буфера и подождите результат.
3. Результат оценки теста через 15 минут, но не позднее указанного времени.

Оценка результатов:

- **ПОЗИТИВНЫЙ:** появляются 2 четкие красные линии. Одна должна быть в контрольной зоне (C), а другая линия должна быть в тестовой зоне (T).
- **ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ:** одна красная линия появляется в контрольной зоне (C). В тестовой зоне (T) не появляется красная или розовая линия.
- **НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ:** контрольная линия не отображается. Просмотрите инструкцию и повторите тест с новой кассетой.

Срок годности

24 месяца.

Условия хранения

Хранить при температуре от +2 до +30 °C.