

Опис

ОКУТИАРЗ[®] АЛО+ - це зволожуючий стерильний офтальмологічний розчин, який не містить консервантів. У склад крапель входить перехресно-зв'язаний натрію гіалуронат (0,2%) та Алое Вера (0,1%), дія яких спрямована на усунення симптомів «сухого ока», дискомфорту очей, а також на захист рогівки.

Стерильний офтальмологічний розчин. Без консервантів

Не є лікарським засобом.

Виріб медичного призначення

Склад

Склад: перехресно-зв'язаний натрію гіалуронат, порошок гелю Алое Вера, динатрію тетраборат декагідрат, кислота борна, натрію хлорид, вода для ін'єкцій.

Перехресно-зв'язаний натрію гіалуронат надає розчину високу в'язкоеластичність, що забезпечує високий ступінь зволоження поверхні ока, а також довгострокове полегшення симптомів «сухого ока».

Алое Вера, завдяки своїм зволожуючим, протизастійним і змащувальним властивостям, надає розчину високу зволожуючу здатність, покращуючи комфорт очей та збільшуючи тривалість відчуття свіжості. Також підтверджена ефективність Алое Вера при почервонінні або чутливості очей, завдяки його

Рекомендації щодо застосування

Усунення симптомів «сухого ока», подразнення та почервоніння, спричиненого впливом навколишнього середовища або лікарськими препаратами. Може застосовуватися також при носінні контактних лінз для зволоження та комфорту очей. ОКУТИАРЗ[®] АЛО+ корисний під час та після:

- тривалого впливу сонячного світла
- впливу кондиціонування повітря
- тривалого перегляду цифрового екрану

ОКУТИАРЗ[®] АЛО+ може також допомогти полегшити дискомфорт після хірургічної операції на очах

Спосіб застосування

Для закапування в очі. Не ковтати

Рекомендований режим дозування по 1-2 краплі в кожне око або декілька раз в день у відповідності до рекомендацій Вашого лікаря або фармацевта. Перед відкриттям флакона вимийте руки та дотримуйтесь правил гігієни під час застосування. Уникайте контакту кінчика флакона з поверхнею ока.

1. При першому застосуванні флакона потягніть та повністю видаліть контрольну стрічку першого відкриття.
2. Акуратно стисніть флакон і закачайте 1 краплю в око.
3. Щільно закрийте флакон після застосування.

Протипоказання

Не застосовуйте при виникненні алергічної реакції або при підвищенні чутливості до будь-якого з компонентів ОКУТИАРЗ® АЛО+. В випадку серйозних захворювань рогівки перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем або фармацевтом.

Побічні ефекти

Як і у випадку застосування інших крапель очних, можливо виявлення слабкого тимчасового дискомфорту, пов'язаного з інстиляцією продукту. В ВИПАДКУ ВИНИКНЕННЯ БУДЬ-ЯКИХ ПОБІЧНИХ ЕФЕКТІВ, ПОВІДОМТЕ НИХ ЛІКАРЮ АБО ФАРМАЦЕВТУ.

Умови зберігання

Зберігати при температурі не вище 25°C. Не заморожувати. Захищати від впливу тепла, прямих сонячних променів та вологи. Не застосовувати, якщо упаковка пошкоджена. Зберігати у недоступному для дітей місці.

Умови зберігання

36 місяців. Використати протягом 90 днів після відкриття флакону. Не використовувати після закінчення терміну придатності, вказаного на упаковці.

Форма випуску

1 флакон об'ємом 10 мл з інструкцією із застосування в картонній коробці.

Виробник

Дистриб'ютор Santen Oy, Фінляндія

(UA) Уповноважений представник виробника в Україні:

Представництво «Сантен Ой» в Україні за адресою 04050, м. Київ, вул. Миколи Пимоненка 13, корпус 7, вхід літера «В», офіс 12; Телефон: 044 2006885; e-mail: ua.santen@santen.com

Виробник: ОФФХЕЛС С.П.А., Віа Гіованні Паісіелло, 10, 50144, Флоренція (ФІ), Італія **на заводі:** С.О.С. Фармацеутиці С.Р.Л., Віа Модена 15, 40019, Сант'Агата Болоньезе (БО), Італія