

Опис

Якщо у Вас з'явилися сумніви, щодо результатів тесту, Ви можете провести повторний тест. Для цього використовуйте упаковку EVITEST PLUS, до складу якої входить 2 тест-смужки. Повторний тест необхідно проводити через 2 доби, оскільки концентрація ХГЛ в організмі вагітної жінки подвоюється протягом 48 годин.

Тест для імунохроматографічного визначення хоріонічного гонадотропіну людини (ХГЛ) у сечі для ранньої діагностики вагітності.

Чутливість: 20 mIU/ml (20 mMO/мл).

Точність тесту - більше 99%. Визначення вагітності з першого дня затримки менструації. Повторно використовувати заборонено.

ПРИНЦИП ДІЇ ТЕСТУ:

Під час вагітності у жінки продукується гормон – хоріонічний гонадотропін людини (ХГЛ), який можна визначити в сечі. Тест для визначення вагітності має антитіла, що специфічно реагують з цим гормоном. Коли зразок сечі потрапляє на тест, цей зразок пересувається по мембрані за рахунок капілярної дії. Коли ХГЛ, що міститься в сечі, досягає тестової ділянки (Т), він утворює кольорову лінію. Відсутність кольорової лінії свідчить про негативний результат. З метою контролю при належному проведенні тесту на контрольній ділянці (С) утворюється кольорова лінія.

ВМІСТ ТЕСТОВОГО НАБОРУ

Індивідуальна упаковка містить 2 тест-смужки та вологовбирач. Вологовбирач призначений лише для зберігання та не використовується для тестування.

Інструкція із застосування.

Що ще необхідно для визначення вагітності? При використанні тесту-смужки: сухий чистий пластиковий або скляний контейнер для збору сечі. Таймер або годинник

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ:

- Тільки для зовнішнього застосування, не ковтати.
- Тест можна використовувати тільки один раз. Після використання викинути.
- Не використовувати після закінчення терміну придатності.
- Не використовувати при порушенні цілісності первинного пакування.

- Зберігати в недоступному для дітей місці.

Умови зберігання

Зберігати при температурі від 4°C до 30°C та у запечатаній індивідуальній упаковці до закінчення терміну придатності.

Відкривати первинне пакування тільки безпосередньо перед проведенням тесту.

Не піддавати впливу прямих сонячних променів, вологи та тепла.

Не заморожувати.

Коли проводити тестування? Тест можна проводити в будь-який час доби, проте найкраще проводити тест зранку, після сну, оскільки найбільша концентрація гормону ХГЛ при великому терміні вагітності міститься у ранковій порції сечі.

Як зібрати зразок сечі? Зразок сечі зібрати в сухий чистий пластиковий або скляний контейнер.

Спосіб застосування

- Тест-смужку та зразок сечі слід тримати при кімнатній температурі для тестування.
- Розкрийте індивідуальну упаковку та дістаньте тест-смужку.
- Занурте тест-смужку у зразок сечі в такий спосіб, щоб стрілки були направлені до сечі.
- Вийміть зразок через 3 секунди і покладіть горизонтально на суху чисту поверхню, що не вбирає вологу (наприклад, краї контейнеру для сечі).
- Позитивний результат можна спостерігати за 1 хвилину. Проте, щоб побачити негативний результат, може знадобитися до 3 хвилин. Результат, отриманий після 5 хвилин тестування, варто вважати недійсним.

ЯК ВИЗНАЧИТИ РЕЗУЛЬТАТ

Позитивний (вагітність є): чіткі кольорові лінії проявляються на контрольній тестовій ділянках. Це свідчить про Вашу вагітність. Інтенсивність тестових ліній може різнитися при проведенні різних тестів. Це пов'язано з різною концентрацією ХГЛ на різних термінах вагітності.

Негативний (вагітності немає): кольорова лінія проявляється лише на контрольній ділянці. На тестовій ділянці (Т) лінії немає. Це вказує на відсутність вагітності.

Тест недійсний: жодної видимої лінії або ж кольорова лінія є лише на тестовій ділянці та відсутня на контрольній ділянці. Рекомендується повторити тестування, використовуючи нову тест-смужку. Якщо ж тест знову недійсний, рекомендується звернутися до лікаря або в аптеку, де Ви придбали продукт, вказавши при цьому номер партії.

Якщо ж забарвлення на тестовій ділянці нечітке, рекомендується повторити тест через 48 годин.

Увага! Необхідно звернутися до гінеколога. Лікар має підтвердити вагітність після оцінки всіх клінічних та лабораторних даних, оскільки за певних умов тест може показати хибно-позитивний результат. Також гінеколог надасть необхідну інформацію та поради щодо вагітності.