

## **Опис**

Якщо у Вас з'явилися сумніви, щодо результатів тесту, Ви можете провести повторний тест. Для цього використовуйте упаковку EVITEST PLUS, до складу якої входить 2 тест-смужки. Повторний тест необхідно проводити через 2 доби, оскільки концентрація ХГЛ в організмі вагітної жінки подвоюється протягом 48 годин.

Тест для імунохроматографічного визначення хоріонічного гонадотропіну людини (ХГЛ) у сечі для ранньої діагностики вагітності.

**Чутливість: 20 мIU/ml (20 мМО/мл).**

Точність тесту - більше 99%. Визначення вагітності з першого дня затримки менструації. Повторно використовувати заборонено.

## **ПРИНЦИП ДІЇ ТЕСТУ:**

Під час вагітності у жінки продукується гормон – хоріонічний гонадотропін людини (ХГЛ), який можна визначити в сечі. Тест для визначення вагітності має антитіла, що специфічно реагують з цим гормоном. Коли зразок сечі потрапляє на тест, цей зразок пересувається по мембрані за рахунок капілярної дії. Коли ХГЛ, що міститься в сечі, досягає тестової ділянки (T), він утворює кольорову лінію. Відсутність кольорової лінії свідчить про негативний результат. З метою контролю при належному проведенні тесту на контрольній ділянці (C) утворюється кольорова лінія.

## **ВМІСТ ТЕСТОВОГО НАБОРУ**

Індивідуальна упаковка містить 2 тест-смужки та вологовбиравч. Вологовбиравч призначений лише для зберігання та не використовується для тестування.

## **Інструкція із застосування.**

Що ще необхідно для визначення вагітності? При використанні тесту-смужки: сухий чистий пластиковий або скляний контейнер для збору сечі. Таймер або годинник

## **ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ:**

- Тільки для зовнішнього застосування, не ковтати.
- Тест можна використовувати тільки один раз. Після використання викинути.
- Не використовувати після закінчення терміну придатності.
- Не використовувати при порушенні цілісності первинного пакування.

- Зберігати в недоступному для дітей місці.

## **Умови зберігання**

Зберігати при температурі від 4°C до 30°C та у запечатаній індивідуальній упаковці до закінчення терміну придатності.

Відкривати первинне пакування тільки безпосередньо перед проведенням тесту.

Не піддавати впливу прямих сонячних променів, вологи та тепла.

Не заморожувати.

**Коли проводити тестування?** Тест можна проводити в будь-який час доби, проте найкраще проводити тест зранку, після сну, оскільки найбільша концентрація гормону ХГЛ при великому терміні вагітності міститься у ранковій порції сечі.

**Як зібрати зразок сечі?** Зразок сечі зібрати в сухий чистий пластиковий або скляний контейнер.

## **Спосіб застосування**

- Тест-смужку та зразок сечі слід тримати при кімнатній температурі для тестування.
- Розкрийте індивідуальну упаковку та дістаньте тест-смужку.
- Занурте тест-смужку у зразок сечі в такий спосіб, щоб стрілки були направлені до сечі.
- Вийміть зразок через 3 секунди і покладіть горизонтально на суху чисту поверхню, що не вбирає вологу (наприклад, краї контейнеру для сечі).
- Позитивний результат можна спостерігати за 1 хвилину. Проте, щоб побачити негативний результат, може знадобитися до 3 хвилин. Результат, отриманий після 5 хвилин тестування, варто вважати недійсним.

## **ЯК ВИЗНАЧИТИ РЕЗУЛЬТАТ**

**Позитивний (вагітність є):** чіткі кольорові лінії проявляються на контрольній тестовій ділянках. Це свідчить про Вашу вагітність. Інтенсивність тестових ліній може різнятися при проведенні різних тестів. Це пов'язано з різною концентрацією ХГЛ на різних термінах вагітності.

**Негативний (вагітності немає):** кольорова лінія проявляється лише на контрольній ділянці. На тестовій ділянці (T) лінії немає. Це вказує на відсутність вагітності.

**Тест недійсний:** жодної видимої лінії або ж кольорова лінія є лише на тестовій ділянці та відсутня на контрольній ділянці. Рекомендується повторити тестування, використовуючи нову тест-смужку. Якщо ж тест знову недійсний, рекомендується звернутися до лікаря або в аптеку, де Ви придбали продукт, вказавши при цьому номер партії.

Якщо ж забарвлення на тестовій ділянці нечітке, рекомендується повторити тест через 48 годин.

**Увага!** Необхідно звернутися до гінеколога. Лікар має підтвердити вагітність після оцінки всіх клінічних та лабораторних даних, оскільки за певних умов тест може показати хибно-позитивний результат. Також гінеколог надасть необхідну інформацію та поради щодо вагітності.