

Склад

Основа: пористий, еластичний нетканий матеріал.

Подушечка: поліестер, віскоза.

Упаковка: медичний крафт-папір.

Клей: гіпоалергенний поліакрілатний клей.

Опис

Стерильні пластирні пов'язки MP MedPlast призначені для захисту будь-яких ран, в першу чергу - післяопераційних, від попадання мікробів і травматизації.

Дихаючі. Ніжні. Не прилипають до рани. Віскозна подушечка відмінно вбирає ексудат.

Надійно фіксуються. Легко знімаються.

Метод стерилізації: радіаційний.

Спосіб застосування

Перед накладенням пов'язки рану ретельно очищають і дезинфікують.

Перед застосуванням переконайтеся, що кровотеча в області рани затримана.

Щоб забезпечити добру адгезію на краях, пов'язку слід трохи прижати до центру до країв.

Пов'язку видаляють в напрямку коренів волосся, паралельно шкірі, утримуючи за один край та притримуючи шкіру іншою рукою.

Після використання утилізувати відповідно до вимог чинних національних нормативів і стандартів.