

## **Опис**

HomeTest - гарантовано точний результат. Hometest - найточніші тести з використанням унікальної технології «максимальної чутливості».

- Тип: Тест-смужка
- Досліджуваний зразок: по сечі
- Чутливість: 10 мМо/мл
- Точність результату: більше 99%
- Визначений гормон: ХГЛ-гормон, що виділяється плацентою під час вагітності
- Час очікування результату: від 5хвилин
- Час тестування: до затримки в будь-який час доби

Тести на вагітність призначені для визначення хоріонічного гонадотропіну людини (ХГЛ) в сечі. Він присутній в організмі, як жінок, так і чоловіків і його концентрація може досягати 5-7 мМо/мл. Значно у великих кількостях ХГЛ починає вироблятися плацентою, що розвивається незабаром після запліднення і протягом першого триместру вагітності досягає свого максимуму на терміні 8-12 тижнів.

### **Принцип роботи тестів для діагностики вагітності:**

Тест заснований на визначенні концентрації гормону хоріонічного гонадотропіну людини (ХГЛ) в сечі, який починає вироблятися в організмі жінки після закріплення заплідненої яйцеклітини в порожнині матки. У нормі це відбувається на 5-6 день після запліднення. Рівень ХГЛ вагітної жінки в сечі через 2 тижні після зачаття становить приблизно 20-100 мМо/мл, таким чином до моменту тестування концентрації ХГЛ як мінімум в два рази перевищує поріг чутливості тесту.

### **Оцінка результатів:**

У разі позитивного результату у тестовій зоні з'являються дві червоні або рожеві лінії (тестова і контрольна). У разі негативного результату з'являється одна червона або рожева лінія (контрольна).

### **Спосіб застосування**

- Занурте тест-смужку у ємність із сечею на 5сек., не перетинаючи лінію МАХ.
- Витягніть тест-смужку та залиште в сухому місці на 5-10 хв.

- Перевірте результат тесту.

**Термін придатності**

Три роки (36 місяців)

**Умови зберігання**

Зберігати при температурі від +2 °С до +30 °С.