

Опис

- Догляд за зубами щодня
- Унікальний зовнішній вигляд
- Широка ручка проти ковзання
- Зубна ультратонка нитка з високою міцністю
- Гнучкий наконечник зубочистки

Матеріал: пластик, поліестер.

Спосіб застосування

Використовуйте зубну нитку після кожного прийому їжі. Ковзайте ниткою вперед і назад між зубами. Обертайте нитку з боків кожного зуба та навколо лінії ясен. Використовуйте наконечник для масажу ясен і очищення проміжків між зубами. Змийте водою при необхідності.

Застереження

Дітям віком до 10 років рекомендовано лише під наглядом дорослих. Ясна можуть кровоточити під час перших кількох користувань зубною ниткою. Якщо кровотеча не припиняється або ясна залишаються червоними та набряклими, зверніться до стоматолога. Утилізуйте зубну нитку після використання.

Виробник

Країна походження: Китай

Виробник: Royaumann Co.,Ltd (Рояуманн Лтд)

Адреса виробника: 3F, NO.113, Qiushi Road, Beiyuan, Yiwu, China. 322000 (3Ф, №113, Квіші Род, Бейюань, Іу, Китай 322000)

Імпортер: Приватне підприємство "Соломія-Сервіс", 79053, м. Львів, вул. Бойчука буд. 5 кв. 117. Претензії від споживачів приймає імпортер.