

## **Опис**

<b>Умови роботи</b>	<b>Температура: 5~40°C;</b> <b>Відносна вологість: &lt;85%</b> <b>RHATM: 70кПа~106кПа</b>
<b>Умови зберігання</b>	<b>Температура: -20~55°C</b> <b>Відносна вологість: &lt; 85%</b> <b>RHATM: 70кПа~106кПа</b>
<b>Діапазон</b>	<b>32,0~42,9°C</b> <b>Нижче 32,0°C відображається Lo°C</b> <b>Вище 42,9°C відображається Hi°C</b>
<b>Час вимірювання</b>	<b>Первинні показники приблизно за 60 секунд</b>
<b>Автоматичне відключення</b>	<b>Автоматичне відключення приблизно через 10 хвилин</b>
<b>Акумулятор (в комплекті)</b>	<b>LR 41 (1,5 В)</b>

Матеріал: акрилонітрил-бутадіен-стирол, полівінілхлорид.

## **Спосіб застосування**

Використовуйте для вимірювання температури під пахвою, у ротовій порожнині або ректально.

Застережені заходи: не зберігайте пристрій під прямыми сонячними променями, при високій температурі, у високій вологості або пилу. Продуктивність може бути погіршена. Припиніть використовувати термометр, якщо він працює нерівномірно або якщо дисплей не працює. Тримайте у недоступному для дітей

місці. Не намагайтесь розібрати пристрій, за винятком заміни батареї. Якщо термометр зберігався при температурі нижче нуля, перед використанням дайте термометру нагрітися природним шляхом до кімнатної температури.

## **Термін придатності**

Дата виготовлення: 05.2024. Термін придатності: необмежений. Номер партії відповідає даті виготовлення.

## **Виробник**

Країна походження: Китай

Виробник: Wenzhou Yosun Medical Technology Co., Ltd. (Веньчжоу Йосун Медікал Текнолоджі Ко., Лтд.)

Адреса виробника: No. 17, Shahong Road, Lingmen Beibaixiang Town, Yueqing, Wenzhou 325603 Zhejiang P. R. China ( Н. 17, Шахон Роад, Лінгмен Бейбайчсян Таун, Юецин, Веньчжоу 325603 Чжецзян, КНР)

Постачальник: Royaumann Co.,Ltd (Рояуманн Лтд)

Адреса постачальника: 3F, NO.113, Qiushi Road, Beiyuan, Yiwu, China. 322000 (3Ф, №113, Квіші Роад, Бейюань, Іу, Китай 322000)

Імпортер: Приватне підприємство "Соломія-Сервіс", 79053, м. Львів, вул. Бойчука буд. 5 кв. 117. Претензії від споживачів приймає імпортер.