

Опис

- Сильна довготривала фіксація
- Без цинку
- Нейтральний смак
- Без штучних барвників
- Простий у використанні
- Фіксує до 24 годин
- Зроблено в Швейцарії

Примітка: якщо крем важко видавити з тюбика, помістіть його на короткий час у склянку з теплою водою (до 50°C), переконавшись, що ковпачок не занурений. Якщо отвір трубки забивається, розблокуйте його чистою шпилькою. Тримайте наконечник тюбика сухим і вільним від надлишків крему, щоб запобігти засміченню. Якщо у вас виникли труднощі зі зняттям протеза після нанесення адгезивного крему, прополощіть рот теплою водою.

Завдяки своїй інноваційній формулі, що не містить цинку, цей клейовий крем для зубних протезів преміум-класу забезпечує міцну тривалу фіксацію до 24 годин, (для верхніх протезів). Реагуючи з вологою в ротовій порожнині, крем створює зручне ущільнення між зубними протезами та яснами, таким чином запобігаючи застряганню частинок їжі між ними. Формула має нейтральний смак, та допомагає вашим протезам залишатися без запаху. Його легкість у використанні та підтверджені результати дозволять вам знову їсти, пити та посміхатися з упевненістю.

Рекомендації щодо застосування

Не використовуйте продукт, якщо наконечник трубки не закритий. Використовуйте засіб відповідно до інструкції із застосування. Зберігати в недоступному для дітей місці. Не використовуйте, якщо є відома чутливість або алергія на один із інгредієнтів. Якщо ви приймаєте ліки, які можуть вплинути на ваші ясна або ротову порожнину, проконсультуйтеся зі стоматологом перед використанням продукту. У разі подразнення або хворобливості ясен припиніть використання, та за необхідності зверніться до стоматолога. Біль та дискомфорт в яснах також можуть бути спричинені неправильно підібраними або зламаними зубними протезами, тому важливо регулярно консультиватися зі своїм стоматологом. Зберігати в сухому місці та при кімнатній температурі. Якщо після зняття зубного протеза на яснах є залишки клейкого крему, прополощіть рот теплою водою або обережно почистіть ясна зубною пастою

Перед використанням прочитайте застереження.

- Перед нанесенням крему очистіть зубний протез як зазвичай.
- Зніміть з трубки металевий захисний та гігієнічний герметик.
- Нанесіть крем на сухий протез, як показано на малюнку.
- Обережно зволожите зубний протез водою перед тим, як використовувати та випийте ковток води, щоб зволожити ясна. Це особливо рекомендується для пацієнтів, які страждають на сухість у роті, оскільки крем активується під впливом вологи або слини.
- Помістіть зубні протези до ротової порожнини і утримуйте їх на місці, притискаючи кілька секунд.
- Перед вживанням їжі чи напоїв зачекайте 5 хвилин.

Застереження

При потраплянні на слизові оболонки очей, необхідно ретельно промити їх водою. Оберігати від потрапляння прямих сонячних променів. Зберігати за температури +5 - +25 °C. Номер партії та термін придатності: див. на упаковці.

Виробник

Боніф АГ Хейлікройц 16 Ф-9490 Вадуц, Ліхтенштейн (BONYF AG, Heiligkreuz 16, FL 9490 Vaduz, Liechtenstein)

Імпортёр: Приватне підприємство "Соломія-Сервіс", 79053, м. Львів, вул. Бойчука буд. 5 кв. 117.

Претензії від споживачів приймає імпортер та уповноважений представник.

Уповноважений представник: Приватне підприємство "Соломія-Сервіс", 79053, м. Львів, вул. Бойчука буд. 5 кв. 117.