

Опис

Пластирі медичні нестерильні для сухих мозолів. Не містить PVC

Склад набору: 7,2 x 2 см — 10 шт

Застереження

Для зовнішнього застосування. Тримати у недоступному для дітей місці. Не використовувати на пошкодженій, почервонівшій або подразненній шкірі. У разі появи підвищеної чутливості чи подразнення на шкірі припинити застосування. Особам, які хворіють на діабет, мають проблеми з циркуляцією крові, вагітним та годуючим жінкам, дітям до 16 років, - рекомендовано проконсультуватись з лікарем перед застосуванням.

Зберігайте продукт в оригінальній упаковці у чистому, сухому, прохолодному місці.

Спосіб застосування

Перед застосуванням очистити та підсушити мозоль та область навколо неї, щоб забезпечити надійне приклеювання та ефективність. Дістати пластир із захисного паперу та приклеїти його, помістивши центр пластиру на мозоль. Міняти пластир щодня.

Примітка для користувача та/або пацієнта: Усі претензії приймає ПП «Соломія-сервіс». У разі виникнення будь-яких питань щодо застосування пластиру - проконсультуйтеся з лікарем.

Не використовувати довше 2-х тижнів без консультації з лікарем. Містить 35-40% саліцилову кислоту. У випадку серйозних інцидентів - повідомте про це імпортеру та компетентному органу.

Виробник

Імпортер: ПП " Соломія Сервіс" 79053, м. Львів, вул. Бойчука, буд 5, кв. 117