

Склад

Ізотонічний розчин ропи «Моршинська № 1» .Містить такі мікроелементи: K^+ , Na^+ , Ca^{2+} , Mg^{2+} і аніони: Cl^- , SO_4^{2-} .

Властивості

Засіб для зрошення і промивання носа Но-Соль очищуючий:

- сприяє очищенню слизової оболонки носа від вуличного і кімнатного пилу;
- завдяки своїм властивостям засіб для зрошення і промивання носа Но-Соль очищуючий відновлює функції носа, тим самим зменшує місцевий запальний процес та знижує ризик ускладнень;
- засіб для зрошення і промивання носа Но-Соль очищуючий підтримує нормальний фізіологічний стан слизової оболонки порожнини носа;
- розріджує слиз та нормалізує його вироблення в слизовій оболонці носової порожнини;
- покращує функцію миготливого епітелію, що посилює опірність слизової оболонки порожнини носа і придаткових пазух до проникнення патогенних бактерій і вірусів;
- змиває та видаляє алергени і гаптени зі слизової оболонки носа.

Засіб для зрошення і промивання носа Но-Соль очищуючий може застосовуватися під час вагітності та в період годування груддю.

Рекомендації щодо застосування

Засіб для зрошення і промивання носа Но-Соль Очищуючий застосовується:

- як засіб щоденної гігієни порожнини носа для збереження захисних властивостей слизової оболонки в умовах підвищеної сухості або забруднення повітря (кондиціонування, центральне опалення, задимлене приміщення тощо) з метою збереження фізіологічних характеристик слизової оболонки у змінених мікрокліматичних умовах;
- при гострих та хронічних запальних захворюваннях носоглотки, придаткових пазух носа та носової порожнини різної етіології (риніти, синусити);
- як засіб профілактики та у разі захворювання ГРЗ, ГРВІ, застуди;
- для очищення слизової оболонки носа від пилу, алергенів та інфікованого слизу;

- з профілактичною метою для очищення носової порожнини при роботі в шкідливих умовах;
- при інфекційних захворюваннях носа та носоглотки в осінньо-зимовий період;
- у складі комплексного лікування аденоїдів у дітей;
- для підготовки до введення в порожнину носа лікарських засобів (для поліпшення їх всмоктування);
- для полегшення стану пацієнта при алергічних, вазомоторних та цілорічних ринітах.

Промивання носової порожнини Засобом для зрошення і промивання носа Но-Соль очищуючий призводить до механічного очищення слизової оболонки від пилу, слизових виділень та інших патогенних факторів (бактерій, алергенів, вірусів), діючих на слизову оболонку;

При запальних захворюваннях носа з рясним утворенням слизу і слизово-гнійних виділень використання Засобу для зрошення і промивання носа Но-Соль очищуючий сприяє більш швидкій евакуації слизу, поліпшує застосування місцевих лікарських засобів і полегшує дихання.

Спосіб застосування та дози

Краплі назальні.

- Дорослим - по 2 краплі;
- дітям віком від 1 року - по 1-2 краплі;
- дітям до 1 року - по 1 краплі у кожен носовий хід 3-4 рази на добу з лікувальною метою, з гігієнічною метою - 1-4 рази на добу.

1. Докрутіть ковпачок до упору за годинниковою стрілкою.
2. Спеціальний шип зробить отвір у верхній частині.
3. Тепер можна користуватись засобом.

Техніка промивання носа

Промивання носа у дітей рекомендується проводити в положенні лежачи.

- 1) Поверніть голову дитини набік і трохи вперед (не закидаючи голови).
- 2) Введіть кінчик флакона-крапельниці в ніс дитини (у верхній носовий хід) і закачайте 1-2 краплі засобу залежно від віку. Для дітей до 1 року - по 1 краплі, для дітей від 1 року - по 1-2 краплі в кожен носовий хід.

3) Введіть кінчик флакона-крапельниці в ніс дитини (у верхній носовий хід) і закачайте 1-2 краплі засобу залежно від віку. Для дітей до 1 року – по 1 краплі, для дітей від 1 року – по 1-2 краплі в кожен носовий хід.

4) Проведіть цю процедуру з іншим носовим ходом.

Завдяки хімічному складу та концентрації тривалість та кратність використання Засобу для зрошення і промивання носа «Но-Соль[®] очищуючий» не обмежені, виріб є безпечним при тривалому застосуванні, не викликає звикання.

Умови зберігання

Зберігати при температурі не вище 25 °С в недоступному для дітей місці.