

## **Склад**

Cellulose Gum (28%), Petrolatum, Paraffinum Liquidum, Calcium/Sodium PVM/MA Copolymer (18%), Carbomer (8%).

## **Опис**

Нова подвійна полімерна система інгредієнтів забезпечує фіксацію плюс комфорт для ясен. Конусоподібна конструкція носію надає неперевершений контроль нанесення крему на базис зубного протезу. Містить додатково карбомер, як пом'якшувальний інгредієнт для ясен.

Підходить для часткових та повнознімних зубних протезів.

Пом'якшувальний ефект на слизову оболонку для захисту ясен від тиску , спровокованого частковими та повнознімними зубними протезами. Надає стійку фіксацію протягом 12-ти годин.

## **Показання**

Для фіксації зубних протезів.

## **Протипоказання**

Індивідуальна підвищена чутливість до компонентів засобу.

## **Спосіб застосування та дози**

Як зафіксувати зубний протез:

1. Очистіть та висушіть протез.
2. Нанесіть фіксуєчий крем на протез смужками, як показано на малюнку, але не дуже близько до країв зубного протезу.
3. Верхній протез: нанесіть фіксуєчий крем довгою безперервною смужкою. Додайте дві короткі смужки на середину протеза.
4. Нижній протез: нанесіть фіксуєчий крем довгою безперервною смужкою.
5. Частковий протез: нанесіть фіксуєчий крем у дві короткі смужки.
6. Прополощіть рот перед тим, як вставити протез.
7. Вставте протез в ротову порожнину, щільно притисніть і прикусіть на декілька секунд для надійної фіксації.

Як зняти зубний протез:

- Прополощіть рот теплою водою.
- Повільно вийміть зубний протез, гойдаючими рухами.
- Видаліть залишки фіксуючого крему з протезу та ротової порожнини за допомогою теплої води та м'якої щітки.
- Для повного очищення протеза використовуйте таблетки для очистки зубних протезів Корега.

### *Особливості застосування*

Деякі пацієнти можуть мати алергію або підвищену чутливість до фіксуючого крему. Якщо у Вас виникне алергічна реакція або дискомфорт, негайно припиніть використання. Можуть виникати інші побічні ефекти, такі як подразнення слизової оболонки порожнини рота і шлунково-кишкові симптоми (наприклад, нудота). Важливо повідомляти про інциденти, пов'язані з продуктом, оскільки це може допомогти виявити невідповідності цього продукту та запобігти повторенню подібних інцидентів

### **Умови зберігання**

Зберігати при температурі від 5 °С до 25 °С.

### **Упаковка**

По 40 г у тубі, по 1 тубі в упаковці.

### **Категорія відпуску**

Без рецепта.

### **Виробник**

Stafford-Miller Limited.