

Опис

«ФЛЕГО[®], аноректальний гель при геморої» (надалі за текстом "ФЛЕГО[®], гель") сприяє полегшенню симптомів внутрішнього та зовнішнього геморою (який є проявом варикозного ураження вен прямої кишки), таких як свербіння, печіння, набряк та дискомфорт в ділянці анального отвору та прямої кишки, слизові або кров'янисті виділення з прямої кишки; зменшенню гемороїдальних вузлів; прискоренню загоєння мікротравм та тріщин анального отвору та прямої кишки.*

Комплексна дія «ФЛЕГО[®], гель», згідно з загальнодоступними літературними джерелами, обумовлена властивостями його складових:

- Екстракт кори дуба (*Quercus robur*) чинить в'яжучу, протизапальну та заспокійливу дію, утворює захисний бар'єр, зменшує набряк тканин та захищає тканини від можливого інфікування, прискорює загоєння ран;
- Діосмін та гесперидин є біофлавоноїдами рослинного походження, які сприяють підвищенню тонуусу венозних та лімфатичних судин, зменшенню венозного й лімфатичного застою, зміцненню стінок судин і зменшенню їх проникності, зменшенню запалення та набряку навколишніх тканин, покращенню мікроциркуляції й трофіки тканин, запобіганню тромбоутворення.

Медичний виріб.

Склад

Екстракт кори дуба (*Quercus robur*), діосмін, гесперидин, карбомер 940, гідроксид натрію, метилпарабен, пропілпарабен, вода очищена.

Рекомендації щодо застосування

«ФЛЕГО[®], гель» призначений лише для місцевого застосування в ділянці анального отвору та прямої кишки.* Використовуючи «ФЛЕГО[®], гель», необхідно дотримуватися способу та умов використання, що вказані у відповідному розділі цієї інструкції.

Не використовуйте «ФЛЕГО[®], гель» при наявності підвищеної чутливості, алергії до будь-якого компонента, що міститься у складі медичного виробу.

У разі появи анальної кровотечі або підозри на наявність крові в калі, що супроводжується лихоманкою та болем, треба припинити застосування «ФЛЕГО

® , гель» і проконсультуватися щодо подальшого використання медичного виробу з лікарем.

Можливість одночасного використання «ФЛЕГО® , гель» та інших засобів місцевого застосування (кремів, мазей, гелів або супозиторіїв) слід узгоджувати зі своїм лікарем.

Під час вагітності, годування груддю, у дітей або підлітків застосовувати «ФЛЕГО® , гель» тільки за рекомендацією лікаря.

Не використовуйте «ФЛЕГО® , гель» після закінчення строку придатності, що зазначений на упаковці. Не використовуйте медичний засіб якщо ви помітили, що туба пошкоджена, верхня кришка не тримається щільно або гель витікає.

** "Флего® , гель" при внутрішньому геморої (введенні в пряму кишку) слід застосовувати лише за рекомендацією лікаря.*

Спосіб застосування

Дорослим «ФЛЕГО® , гель» застосовувати 2-3 рази на добу; зранку, ввечері перед сном та/або після кожного випорожнення кишечника протягом 5-7 днів, потім 2-3 рази на тиждень до зникнення симптомів або не більше 30 днів. Подальше застосування медичного виробу необхідно узгоджувати з лікарем.

УВАГА! «ФЛЕГО® , гель» слід застосовувати після проведення гігієнічних процедур (анальну ділянку промити теплою водою без мила та підсушити рушником). Перед кожним нанесенням видаляти залишки «ФЛЕГО® , гель» після попереднього нанесення або залишків інших засобів, які використовувалися на цій ділянці.

Перед застосуванням зняти ковпачок та захисну мембрану з туби. Прикріпити аплікатор до туби. Зняти з аплікатора захисний ковпачок і витиснути невелику кількість гелю для заповнення аплікатора. Одразу після нанесення гелю відкрити аплікатор і промити його теплою водою. Тубу закрити кришкою, щоб гель не висохав. Після того як аплікатор висох необхідно надіти на нього верхню кришку.

«ФЛЕГО® , гель» можна застосовувати двома способами:

1. При зовнішньому ураженні анальної ділянки - обережно через аплікатор нанести гель на шкіру та розподілити.
2. При внутрішньому ураженні прямої кишки* - обережно помістити аплікатор у пряму кишку і натиснувши на тубу видавити необхідну кількість гелю.

Побічні ефекти

Під час застосування медичного виробу «ФЛЕГО[®], гель» можуть виникати побічні ефекти у вигляді підвищеної чутливості, алергії або місцевого подразнення шкіри чи слизових оболонок анальної ділянки.

У разі якщо ви помітили виникнення побічного ефекту будь-якого типу, описаного чи не описаного в інструкції щодо застосування, зверніться до лікаря.

Термін придатності

3 роки з дати виготовлення зазначеної на упаковці.

Умови зберігання

Гель слід зберігати в оригінальній тубі, належним чином закритій, при температурі від 10°C до 25°C, в сухому місці, захищеному від морозу, прямих сонячних променів та випромінювання тепла. Зберігати у недоступному для дітей місці.

Виробник

ВИРОБНИК: ВУЛМ с.р.о., (VULM s.r.o.) Туховська 18, 83106 Братислава, Словацька Республіка на замовлення СІА "Ворвартс Фарма", вул. Кріш'яна Барона 15, Рига, ЛВ-1011, Латвія.

Уповноважений представник виробника в Україні/Офіційний імпортер в Україну: ТОВ "ВОРВАРТС ФАРМА", вул. Пріцака Омеляна 4, м. Київ, 03142, Україна.
Тел/факс: +38 (044) 594 95 05